



ACTIVATOR: DIE BRAILLEZEILE, DIE IHNEN GANZ NEUE UND SMARTE MÖGLICHKEITEN BIETET

Der neue Activator erweitert die bewährten Eigenschaften von HelpTech-Braillezeilen - wie konkave Braillemodule und der ATC-Technologie (Erkennen der Leseposition und automatisches Weiterschalten) - um Innovationen aus noch nie dagewesenen Hard- und Software-Lösungen in einem modernen Design. Durch die Verbindung mit der Power des iPhones bietet der Activator ein Braille-Erlebnis der nächsten Generation

- 40 konkave Braillemodule mit Cursorrouting und einstellbarer Stiftstärke
- Integrierte Kurzschriftübersetzung und -rückübersetzung (RTFC)
- Klappbare 2-in-1 Tastatur mit Punktschrift- und Texteingabe
- SmartDock mit Ladefunktion und integriertem USB-A-Port
- Kostenlose App mit Funktionen wie Braillemonitor, Sprachein- und -ausgabe, uvm.
- Ergonomisches und ultraflaches Design



Durch das magnetische SmartDock entsteht eine Verbindung zwischen dem Activator und Ihrem iPhone.

Zwei Tastaturen in einem

Der Activator besticht durch eine multifunktionale Klapptastatur mit Brailleeingabe. Mit nur einem Handgriff wird die ergonomisch gestaltete Brailletastatur zu einer vollwertigen Computertastatur mit taktiler Schaltcharakteristik. Damit bietet der Activator für jeden Anwendungsfall den perfekten Eingabemodus.

iPhone Verbindung dank magnetischem SmartDock

Durch das SmartDock entsteht eine bahnbrechende Symbiose aus Braillezeile und iPhone, die vollkommen neue Möglichkeiten bietet und den Activator im Handumdrehen zu einer mobilen Workstation macht. Dank einem USB-Port können Dateien über das iPhone geöffnet und bearbeitet werden. Auch können weitere Geräte wie Kopfhörer, Mikrofone oder SD-Kartenleser verbunden werden. Sofern der Activator mit dem Netzteil verbunden ist, wird auch das iPhone geladen um eine besonders lange Nutzungsdauer zu gewähren. Durch die Verbindung mit dem iPhone werden die internen Funktionen des Activators um SmartServices erweitert und einem eigenen Nachrichtenbereich oder der Lieblingsappnutzung steht nichts mehr im Weg.

Integrierte Kurzschriftübersetzung

Die Übersetzung und Rückübersetzung von Vollschrift in Kurzschrift ist dank RTFC in den Activator integriert. Auch die Kurzschriftübersetzung in Unified English Braille bewältigt der Activator mühelos.

Unterstützende App

Mit der kostenlos für das iPhone verfügbaren App wird der Activator um viele neue Funktionen erweitert. So können dank des Braillemonitors beispielsweise sehende Personen die Informationen der Braillezeile auf dem iPhone-Display mitverfolgen (inklusive Leseposition, Textmarkierungen und der Cursorposition). Dank der Diktierfunktion können per Spracheingabe Texte diktiert anstatt eingetippt werden und mithilfe der Sprachausgabefunktion werden Texte über die Lautsprecher des iPhones vorgelesen. Ein weiteres Highlight ist der Dateimanager, der einen Dateiaustausch zwischen dem iPhone und dem Activator ermöglicht sowie die Textübertragungsfunktion, die Texte aus der iPhone Zwischenablage direkt zum Activator überträgt.

TECHNISCHE DATEN

- 40 konkave Brailleelemente mit Cursorrouting
- 8 Funktionstasten/Brailleeingabetasten
- ATC Technologie
- Anschlüsse Activator: USB-C, Bluetooth
- Anschlüsse SmartDock: USB-A, Lightning
- Gewicht: 970g (Activator), 100g (SmartDock)
- Maße zugeklappt: 32 x 2,6 x 12,6 cm (B x H x T)
- Maße aufgeklappt: 32 x 1,8 x 18,8 cm (B x H x T)
- Akkulaufzeit: über 30 Stunden

