


TOPAZ[®] Bedienfeld Referenzkarte

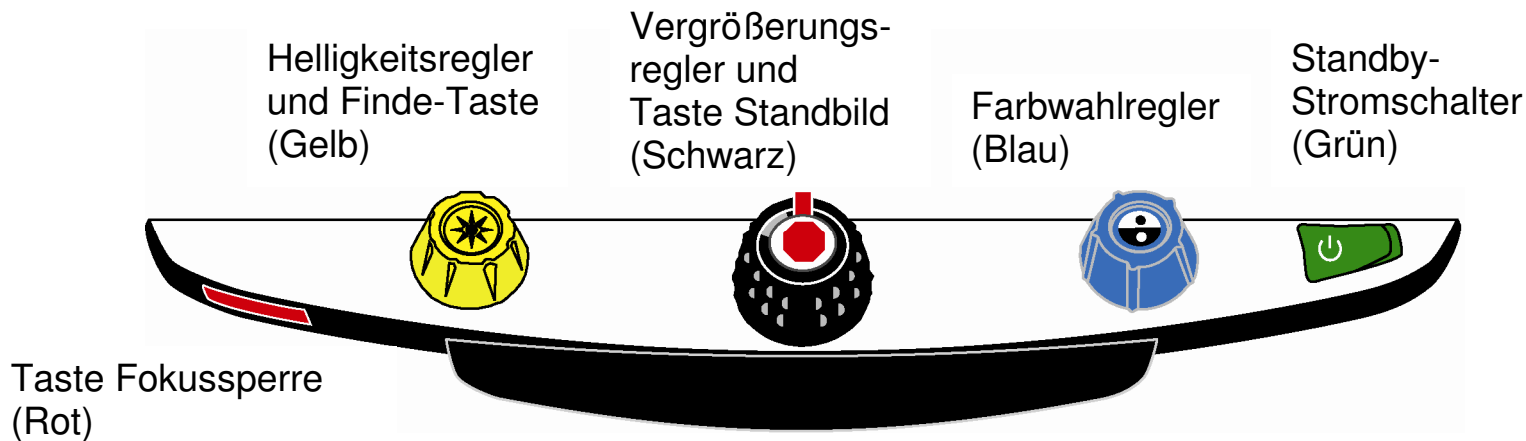

Regler / Taste / Schalter	Funktionsweise
Helligkeitsregler / Finde-Taste (Gelb)	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu vermindern. • Die Taste in der Mitte drücken und halten, um mit Hilfe der Finde-Funktion eine Übersicht zu bekommen. Loslassen, um wieder in die eigene Einstellung zurückzukehren.
Vergrößerungsregler / Taste Standbild (Schwarz)	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen, um die Vergrößerung zu erhöhen oder zu vermindern. • Die Taste in der Mitte drücken, um die Funktion Standbild an- oder abzuschalten.
Farbwahlregler (Blau)	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen, um eine geeignete Farbeinstellung auszuwählen.
Standby-Stromschalter (Grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Nach rechts drücken, um TOPAZ in den Standby-Modus zu versetzen. Nach links drücken, um TOPAZ aus dem Standby-Modus heraus wieder zu aktivieren.
Taste Fokussperre (Rot)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die Fokussperre ein- oder auszuschalten. • Durch gleichzeitiges Drücken zusammen mit der Taste in der Mitte des gelben Helligkeitsreglers können Sie die LED-Beleuchtung ein- und ausschalten.